



COMPOSITI COMPOSITES


GC




COMPOSITI-COMPOSITES

GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Sottoposto a controlli continui per garantire una perfetta aderenza e resistenza quando si applica su metallo, ceramica o plastica. Con GC Ortho Connect, non è necessario applicare l'adesivo sul dente, poiché è già incorporato nella pasta. Una semplice mordenzatura dello smalto seguita da asciugatura è sufficiente per preparare l'attacco o il tubo buccale per l'incollaggio.


GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Comprobado continuamente para garantizar una adhesión y resistencia perfectas cuando se aplica sobre metal, cerámica o plástico. Con GC Ortho Connect, no es necesario aplicar el adhesivo al diente, ya que ya está incrustado en la pasta. Un simple grabado del esmalte seguido de un secado es suficiente para preparar el accesorio o el tubo bucal para pegar.

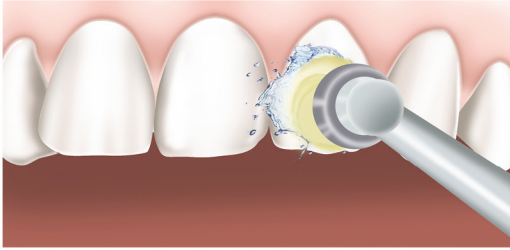


1) Pulire le superfici dei denti con pomice e acqua. Risciacquare abbondantemente con acqua. - 1) Limpiar las superficies de los dientes con piedra pómez y agua, aclarar abundantemente con agua.

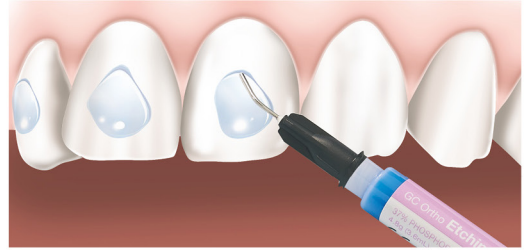


2) Applicare sulla superficie dei denti GC Ortho Etching Gel per 30 secondi, risciacquare e asciugare. - 2) Aplique GC Ortho Etching Gel en la superficie de los dientes durante 30 segundos, enjuague y seque.

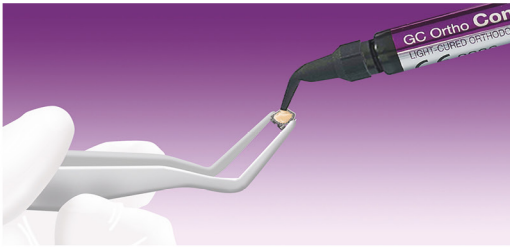

3) Applicare sulla base del bracket la pasta adesiva GC Ortho Connect. 3) Aplique la pasta adhesiva GC Ortho Connect a la base del Bracket.

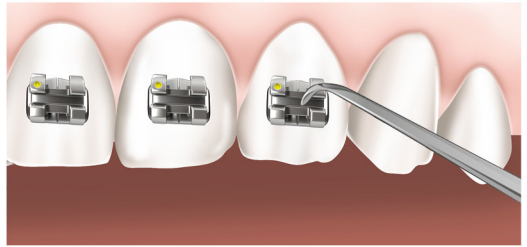

4) Posizionare i brackets sulle superfici dei denti. 4) Coloque los brackets en las superficies de los dientes.

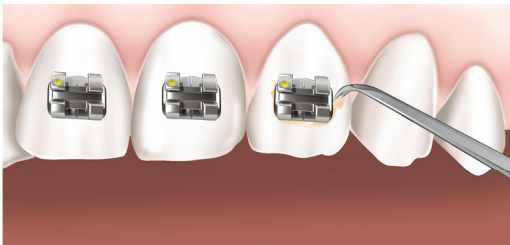

5) Se necessario rimuovere il composito in eccesso. 5) Si es necesario, elimine el exceso de comosite.



6) Utilizzare una lampada fotopolimerizzante a Led per 10 secondi sia mesialmente che distalmente su ogni bracket. - 6) Utilice una lámpara de polimerización LED durante 10 segundos tanto en sentido mesial como distal en cada bracket.

COMPOSITI-COMPOSITES

Base Interna per Ortodonzia Linguale Base interna para ortodoncia lingual

GC KommonBase™



I miglioramenti nella progettazione di base personalizzata e nei materiali di adesione hanno portato allo sviluppo di un preciso sistema di Bonding diretto chiamato GC KommonBase. Il sistema è dotato di un'ampia base di Bonding che fornisce un preciso adattamento e posizionamento degli attacchi, migliorando la forza del Bonding. Nessuna mascherina di trasferimento è necessaria perchè le basi si autoposizionano, inoltre, utilizzando un jig di riferimento, si possono sostituire i singoli attacchi in caso di distacco o in caso di riposizionamento.

Las mejoras en el diseño de la base personalizada y los materiales de unión han llevado al desarrollo de un sistema de unión directa preciso llamado GC KommonBase. El sistema está equipado con una amplia base de unión que proporciona un ajuste y un posicionamiento precisos de los accesorios, lo que mejora la resistencia de la unión. No es necesaria ninguna férula de transferencia porque las bases son autoposicionables, además, utilizando una plantilla de referencia, los brackets individuales se pueden reemplazar en caso de desprendimiento o en caso de reposicionamiento.

2 siringhe di 2,7 g, 4 punte di erogazione e 1 coperchio di protezione leggero 2 jeringas de 2,7 g, 4 puntas dispensadoras y 1 funda protectora ligera	Cod.
Kommon Base HV Clear (Alta Viscosità)- (Alta viscosidad)	90-1200-0000
Kommon Base LV Pink (Bassa Viscosità)- (Baja viscosidad)	90-1300-0000





Ortospecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Ortospecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es